

Zusammensetzen und Benutzen der Medela Symphony Milchpumpe



Stecken Sie die weiße Membrane auf den Ventilkopf



Stecken Sie den Ventilkopf auf die Brusthaube



Schrauben Sie die Flasche auf die Brusthaube mit dem ventil



Stecken Sie den Schlauch fest in die Brusthaube



Das andere Ende des Schlauches an der Pumpe anstecken

Medela England No. 4800758



Setzen Sie die Brusthaube mittig über der Brustwarze auf



Schalten Sie die Symphony ein



Regulieren Sie das Vakuum, bis es **leicht** unangenehm wird und gehen Sie dann auf Ihr persönliches **Maximum Komfort-Vakuum** zurück



Sobald die Milch zu fließen beginnt, schalten Sie mit der 'Let down' Taste in den Abpumpmodus.

Bitte beachten Sie bei jedem Gebrauch, daß die Membrankappen und die Membrane dicht abschließen

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Hebamme